

<u>Lieu</u> : clinique de St Omer	<u>FICHE PROCEDURE:</u> Réalisation de bac de Pré-désinfection des Dispositifs Médicaux souillés	FP /réal/sol/pre/désinf/DM/01.14
<u>Service</u> : Stérilisation centrale zone sale		<u>Date</u> : 12/01/2014

OBJET : Ce protocole décrit la préparation des bacs de pré-désinfection des matériels souillés. Ces DM proviennent du bloc opératoire, des services d'hospitalisation, des soins externes et des services de consultations.

La pré-désinfection permet de ramollir les salissures, de diminuer la population microbienne, la protection des personnels et de l'environnement.

DOMAINE D'APPLICATION : Ce protocole est destiné au service/ personne de Stérilisation centrale en zone sale

QUI ? : L'agent de stérilisation en zone de lavage

PROCEDURES A RESPECTER AU PREALABLE :

- tenue : tunique pantalon, chaussures antidérapantes, coiffe, gants manches longues, tablier de protection, lunettes ou visières de protection, masque,
- lavage des mains,
- bionettoyage des plans de travail

MATERIEL et PRODUIT:

Les bacs de pré-désinfection en plastique de différente contenance munis de couvercle.
Pré-désinfectant.

MODE OPERATOIRE OU PROTOCOLE : après avoir respecté les différentes procédures préalables

- remplir les bacs de pré-désinfection avec de l'eau à une température inférieure à 30°C jusqu'au niveau souhaité
- ajouter le détergent-désinfectant approprié en **respectant le dosage**
- refermer le bac de pré-désinfection
- positionner le bac de pré-désinfection sur le chariot de transport
- ranger le matériel et produit
- effectuer le bionettoyage des plans de travail
- réaliser le lavage des mains