

## 2. Réception et nettoyage des DM sales

### Situation professionnelle

Vous êtes agent de stérilisation de la société Sterience, vous êtes affecté ce jour en zone de lavage. Vous êtes chargé de réceptionner des sets de soin pré-désinfectés en provenance du service de gastro-entérologie de l'hôpital XXX de les contrôler, trier, laver et sécher puis les faire suivre en zone de conditionnement.

### Tâches à réaliser

- Réceptionner, contrôler le contenu du bac (1<sup>er</sup> séquence)
- Vérification quantitative et qualitative des DM
- Effectuer un tri adapté au mode de lavage des dispositifs médicaux pré-désinfectés
- Laver manuellement
- Rincer
- Sécher

### Compétences

C453 Réceptionner, trier les DM

### Savoirs associés

S1 - 4.2 Tenue professionnelle


S2 - 1.2. Caractéristiques des DM : nommer et classer les principaux DM selon leur fonction (ciseaux, pinces, écarteurs, bistouris, aiguilles, clamps...)

Répartition des TP	TD : Les DM
<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 groupes de 2 élèves préparent le bac de prédésinfection avec DM + anomalies. (pré requis).</li><li>-2 ou 4 élèves en : Lavage des mains Tenue professionnelle adaptée Bionettoyage du plan de travail, bac de lavage. Vidanger le bac de prédésinfection si nécessaire. Rincer les DM à l'eau courante Vérification qualitative (pré tri) Vérification quantitative Tri adapté au mode de lavage (3 paniers : lavage manuel, mécanisé et ultra sons).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 groupes de 2 élèves : A partir d'un document avec les photos de différents DM, retrouver sur le catalogue landanger les familles de DM selon leur fonction : -ciseaux, - pinces, -écarteurs, -bistouris, - aiguilles, -clamps</li></ul>

### Travail de synthèse :

Elaboration par les élèves (individuellement) d'une ébauche de protocole.

## Fiche de poste

<p><b><u>Zones d'intervention :</u></b>  <i>Zone de lavage (zone de réception)</i></p>		
<b>Tâches à réaliser</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Non réalisé</b>
Se laver les mains.		
<p>Mettre sa tenue professionnelle complète.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pantalon</li> <li>-tunique</li> <li>-Chaussure de sécurité</li> <li>-Charlotte</li> <li>-Lunettes</li> <li>-Masque</li> <li>-Gants à manchettes longues</li> <li>-sur blouse (tablier)</li> <li>-casque anti bruits</li> </ul>		
Bionettoyer le plan de travail		
Bionettoyer le bac de lavage.		
Réceptionner le bac de prédésinfection avec sa fiche de liaison.		
Vidanger le bac de prédésinfection si nécessaire.		
Rincer les DM à l'eau courante		
Vérification qualitative (pré tri)		
Vérification quantitative		
<p>Trier les DM en fonction du mode de lavage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel</li> <li>- Mécanisé</li> <li>- Ultra sons</li> </ul>		

# LES DISPOSITIFS MEDICAUX

## Objectifs :

- Nommer et classer les principaux DM selon leur fonction

## Classement des DM

**Exercice 1** : à partir de l'observation de la planche d'instruments, en fonction de leurs

formes, définir 6 fonctions :

- Ensemble 1 : .....
- Ensemble 2 : .....
- Ensemble 3 : .....
- Ensemble 4 : .....
- Ensemble 5 : .....
- Ensemble 6 : .....

**Exercice 2** : rassembler les DM de la planche afin de former 6 ensembles en notant les

numéros dans la case exemples de DM

Fonction	Exemples de DM
Ensemble 1 : .....	

Ensemble 2 :.....

Ensemble 3 : .....

Ensemble 4 : .....

Ensemble 5 : .....

Ensemble 6 : .....

**Exercice 2** : découper et coller dans le tableau ci-dessus l'ensemble des DM

