

**Etre capable d'identifier des DMR en vue de la reconstitution de sets de soins simples
(p 13 du guide d'équipement) :**

- La boîte à compresses
- La boîte petite chirurgie

Pré-requis :

Tenue professionnelle adaptée
Lavage des mains
Bionettoyage des plans de travail

Capacités évaluées C456 :

- Identifier correctement les DM
- Reconstituer conformément les sets
- *Capacité à venir : Vérifier la propreté, la siccité et la fonctionnalité des DM*

Savoirs associés :


- Enoncer les caractéristiques des DMR S21.2
- *Savoir associé à venir : Indiquer les contrôles à réaliser sur les DMR S21.3*

2 groupes de travail en alternance sur 2 séances.

TP	TD
<p>Vous êtes agent en stérilisation. On vous demande de sélectionner les DMR afin de reconstituer un set à compresses pour les urgences médicales. Vous complétez la fiche de liaison propre à ce set.</p>	<p>Vous êtes agent de stérilisation. On vous demande de créer le listing du set de petite chirurgie. A partir de la fiche de composition de ce set, réaliser la fiche individuelle du DMR avec photos et caractéristiques</p>
<p>Mise à disposition de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fiche liaison - DM + pochette fournisseur (nom et réf) - Fiche de composition du set p 13 guide d'éq - Panier de reconstitution - papier crêpé - Affichage des protocoles d'hygiène et de sécurité 	<p>Mise à disposition de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DM + pochette fournisseur (nom et réf) - Fiche de composition du set p 13 guide d'éq - Panier de reconstitution - appareil photos - fiche individuelle du DM avec photos et caractéristiques
	

Ciseaux lister, Croix rouge

Photos descriptives du DM (de face, de profil...)

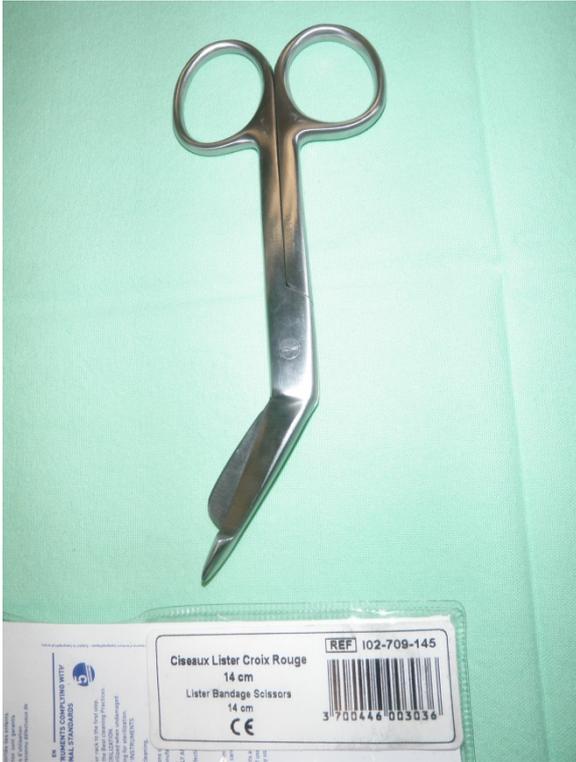

Familles des dispositifs

- Porte aiguilles
- Ciseaux
- Pince de préhension
- Pince coupante
- Burin
- Canule
- Bistouri
- Ecarteurs

Description de la forme

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Mors pointu <input type="checkbox"/> | Crémaillère <input type="checkbox"/> | Démontable <input type="checkbox"/> |
| Mors mousse (arrondi) <input checked="" type="checkbox"/> | Articulation <input checked="" type="checkbox"/> | Léger <input type="checkbox"/> |
| Mors mousse + pointu <input type="checkbox"/> | Creux <input type="checkbox"/> | Lourd <input type="checkbox"/> |
| Mors avec griffes <input type="checkbox"/> | Lame <input checked="" type="checkbox"/> | Longueur : 14 cm |
| Mors sans griffes <input type="checkbox"/> | Courbe <input type="checkbox"/> | Coupant <input type="checkbox"/> |
| Dents <input type="checkbox"/> | Plat <input type="checkbox"/> | Effilé <input type="checkbox"/> |
| | Coudé <input checked="" type="checkbox"/> | Autre : protubérance |

Matériaux de composition :

- Acier inoxydable
- Tungstène
- Caoutchouc
- ...

Identification du set :

- **Boîte à compresses**
-
-
-

Nom du dispositif

Photos descriptives du DM (de face, de profil...)

Familles des dispositifs

- Porte aiguilles
- Ciseaux
- Pince de préhension
- Pince coupante
- Burin
- Canule
- Bistouri
- Ecarteurs

Description de la forme

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Mors pointu <input type="checkbox"/> | Crémaillère <input type="checkbox"/> | Démontable <input type="checkbox"/> |
| Mors mousse (arrondi) <input type="checkbox"/> | Articulation <input type="checkbox"/> | Longueur : |
| Mors mousse + pointu <input type="checkbox"/> | Creux <input type="checkbox"/> | Coupant <input type="checkbox"/> |
| Mors avec griffes <input type="checkbox"/> | Lame <input type="checkbox"/> | Effilé <input type="checkbox"/> |
| Mors sans griffes <input type="checkbox"/> | Courbe <input type="checkbox"/> | Autre : |
| Dents <input type="checkbox"/> | Plat <input type="checkbox"/> | |
| | Coudé <input type="checkbox"/> | |

Matériaux de composition :

- Acier inoxydable
- Tungstène
- Caoutchouc
- Autre :

Identification du set :

-
-
-
-